


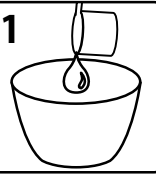


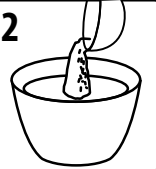


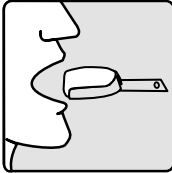
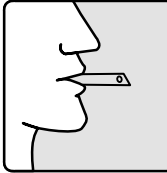
 <hr/>  <hr/> 	20 ml. + 9 g. 1 x	 1 x	1 
	40 ml. + 18 g. 2 x	 2 x	2 

**Only 30''
in mouth**

			
---	---	---	--

mixing time(*) 45''
total working time(*) 1'45''
setting time(*) 3'

Typ I: Szybkie wiązanie odpowiada specyfikacjom ISO 1563.

(*) Pomiary dokonane w temp. 23°C przy użyciu dezjonizowanej wody. Millenium nie wymaga żadnego, przed użyciem przygotowania.

Wymieszać energicznie proszek z wodą.

Alginate według specyfikacji ISO 1563.

Różnica temperatur lub twardość wody w małym stopniu wpływają na czas przygotowania i wiązania.

Umyć, wypłukać i otrząsnąć wycisk i odlać model. Model może być odlewany z doskonałymi rezultatami nawet do 168 godzin.

Wycisk należy przechowywać w zamkniętej, plastikowej torebce bez żadnych dodatków.

Nie trzymać wycisku na powietrzu ani w wodzie.

Proszek przechowywać w pojemnikach dobrze zamkniętych w miejscach suchych i chłodnych.

Doskonałe rezultaty osiąga używając gipsy LASCOD:

Typ 3: Kromotipo 3; Singletipo 3.

Typ 4: Kromotipo 4; Singletipo 4; Ortotipo.