

## Instrukcja stosowania

### Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego GLASSIX/węglowego CARBONITE

#### Wskazania:

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego i węglowego są wykorzystywane przez dentystów do retencji odbudowywanego zęba martwego.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku, gdy korzeń nie jest mocno osadzony w kości, gdy występuje paradontoza lub są inne uwarunkowania. Nie stosować również, kiedy struktura zęba jest słaba, niewystarczająca. Powinno jej być minimum 1 mm z każdej strony wkładu koronowo-korzeniowego. Wkład koronowo-korzeniowy nie może być oparciem korony teleskopowej lub stożkowej, które są trwale mocowanymi elementami mostu, nie mającego mocnego oparcia w zdrowych zębach czy w zębach ostatnich.

#### Środki ostrożności:

Poszerzacze powinny wprowadzane w sposób profesjonalny, przy średniej prędkości obrotowej (500- 1500 obr./min.) ze starannie kontrolowanymi ruchami góra-dół, stopniowo pogłębiającymi kanał korzeniowy. Ważne jest, aby przy wykonywaniu ruchów góra-dół poszerzacz pozostawał w tej samej osi.

#### Sterylizacja:

Nie ma ryzyka przedostania się infekcji do wkładów koronowo – korzeniowych wobec czego sterylizacja nie jest konieczna. Jeśli jednak z jakichkolwiek powodów jest pożądana to należy sterylizować na zimno używając dostępnych i uznanych środków sterylizujących i postępować zgodnie ze wskazówkami producenta. Wszystkie wybrane metody sterylizacji stosowane w gabinecie dentysty są dopuszczalne. Poszerzacze mogą być sterylizowane dowolną metodą.

Sterylizacja poszerzaczy jest rekomendowana pomiędzy kolejnymi stosowaniami.

#### Opakowanie i oznaczenie:

Wkłady koronowo-korzeniowe dostarczane są w dwóch wariantach:

1. 18 wkładów i 3 poszerzacze
2. 6 wkładów

Nr serii **LOT** podany jest na opakowaniu



#### Producent:

HARALD NORDIN S.A.  
Z.I. La Foge 12  
CH- 1816 Chailly s/ Montreux  
Switzerland  
Tel. 41 21/ 964 71 71  
Fax 41 21/ 964 71 74  
e-mail: [nordin@bluewin.ch](mailto:nordin@bluewin.ch)



0120