



HEMOALUSTAT

PŁYN HEMOSTATYCZNY PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

Skład :

25% Chlorek glinu, woda.

Zastosowanie :

Preparat do tamowania drobnych krwawień w obrębie śluzówki jamy ustnej, działający obkurczająco i hemostatycznie. Można stosować również razem z nitkami retrakcyjnymi oraz przy krwawieniu podczas ekstyrpacji miazgi kanałowej zęba.

Sposób użycia :

Po aplikacji na jałową watkę lub mikro-gąbkę wcierać delikatnie w krwawiące miejsce od kilku do kilkunastu sekund. W razie potrzeby można nasączać płynem nitkę retrakcyjną lub wprowadzać do kanału na sączku. Następnie delikatnie spłukać wodą destylowaną lub roztworem soli fizjologicznej – w razie konieczności czynność powtórzyć.

Środki ostrożności:

Ze względu na drażniące działanie unikać kontaktu preparatu z oczami, śluzówką jamy ustnej i skórą. Miejsca przypadkowego kontaktu zaleca się przepłukać dużą ilością wody. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów, pić dużo wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Stosować koferdam, rękawiczki, okulary oraz odzież ochronną podczas pracy z preparatem.

Przeciwwskazania :

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na składniki preparatu.

Przechowywanie :

Przechowywać w temperaturze pokojowej - nie przekraczać 25 stopni C.

Nie przekraczać daty przydatności do użytku podanej na opakowaniu. Po każdym użyciu szczelnie zamykać opakowanie.

Postępowanie z opakowaniami :

Zużyte opakowania utylizować lub zwrócić producentowi.

Zawartość :

Buteleczka PE 10 ml z aplikatorem.

Termin ważności :

2 lata od daty produkcji.

PREPARAT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W STOMATOLOGII.

FIRMA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA PREPARATU NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI 06.01.2014



95-200 PABIANÓW, UL. Ols 10/12
TEL/FAX 42-213-06-37 KOM 510-218-910

WWW.CEMDENTAL.PL

