

## **DEPURAL<sup>®</sup> NEO**

### **Pasta czyszcząco-polarska**

**Producent:**

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

**Skład:**

Karboksymetyloceluloza, fdozforan wodorotlenku wapnia, gliceryna, woda destylowana, środki smakowe

**Charakterystyka:**

DEPURAL<sup>®</sup> NEO jest pastą czyszcząca i polerską, nie zawierającą fluoru.

**Wskazania:**

Pasta DEPURAL<sup>®</sup> NEO o nieznacznych właściwościach abrazyjnych jest przeznaczona do profesjonalnych zabiegów oczyszczania zębów w gabinetach stomatologicznych. Stosowana jest do profesjonalnego oczyszczenia powierzchni zębów po zabiegu usunięcia kamienia, do usuwania płytki bakteryjnej i osadów przed leczeniem zachowawczym czy wybielaniem zębów.

**Przeciwwskazania:**

Nie wolno stosować pasty DEPURAL<sup>®</sup> NEO w przypadku stwierdzenia uczuleń na jakikolwiek z jej składników. Produkt nie jest przeznaczony do codziennej higieny jamy ustnej.

**Sposób stosowania:**

Wyciśnij potrzebną ilość pasty na płytkę i nabierz niewielką jej ilość na szczoteczkę lub gumkę profilaktyczną. Oczyszczaj wilgotną powierzchnię zęba wywierając delikatny nacisk; jeśli trzeba, zmień kierunek obrotów gumki lub szczoteczki. Nabranie odpowiedniej ilości pasty na szczoteczkę lub gumkę gwarantuje chłodzenie instrumentu. Praca ze ssakiem i ślinociągiem pozwala na wypłukiwanie resztek pasty w trakcie pracy.

**Ostrzeżenie:**

DEPURAL<sup>®</sup> NEO zawiera środki ściernie i smakowe, które mogą powodować podrażnienie w przypadku kontaktu z oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu pasty z oczami, należy przepłukać je pod bieżącą wodą, a jeśli dolegliwości nie ustąpią – skontaktować się z lekarzem.

**Uwaga:**

Zakładaj okulary ochronne podczas pracy. Chroń odzież pacjenta przed zaplamieniem. Puste opakowanie i nie wykorzystane resztki pasty powinny być utylizowane tak, jak pozostałe nieczystości.

**Przechowywanie:**

W suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 5-25°C, w dobrze zamkniętym opakowaniu.

**Termin ważności:**

2 lata

**Opakowanie:**

Tuba 75g