

Chema Polish II 35g



Zastosowanie

Pasta do polerowania koron i szyjek zębów, głównie po usunięciu złogów nazębnych (scaling) narzędziami ręcznymi jak i ultradźwiękowymi oraz do polerowania wypełnień amalgamatowych przy użyciu końcówek gumowych lub silikonowych.

Zaleca się wcześniejsze oczyszczanie zębów pastą oczyszczającą CHEMA POLISH I.

Opis działania

Odpowiednio dobrany skład wyrobu zapewnia dobre właściwości polerujące, a obecność hydroksyapatytu zapobiega równocześnie nadwrażliwości szyjek zębów.

Sposób postępowania z wyrobem

Podczas stosowania wyrobu postępować według ogólnie przyjętych zasad profesjonalnego oczyszczania i polerowania zębów.

Nie należy pobierać jednorazowo zbyt dużej porcji pasty, gdyż może to spowodować jej rozpryskiwanie

podczas stosowania; stosować odpowiednie środki ochrony.

Dostępne opakowanie

Opakowanie: tuba laminatowa zawierająca 35 g pasty barwy niebieskiej.

Warunki przechowywania

Wyrób przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze od 15°C –25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.