

KLEJ DO ŁYŻEK WYCISKOWYCH

Preparat poprawiający adhezję silikonowych materiałów wyciskowych do łyżek metalowych. Zalecany zarówno do silikonów addycyjnych (**ELITE H-D+**, **COLORISE**) jak i kondensacyjnych (**ZETAPLUS**, **ZETAFLOW**).

SPOSÓB UŻYCIA

- Powierzchnia łyżki wyciskowej powinna być czysta, odtłuszczona i wysuszona.
- Cienką warstwę preparatu nanieść na całą powierzchnię kontaktu z materiałem wyciskowym.
- Oczekać 2 min. (lub wysuszyć strumieniem powietrza) a następnie nałożyć materiał silikonowy.

UWAGA!

- Chronić oczy i skórę przed kontaktem z preparatem. W przypadku podrażnienia przemyć pod bieżącą wodą.
- Nie wdychać oparów.
- Po użyciu zamknąć szczelnie opakowanie.
- Chronić przed ogniem.
- Chronić ubranie przed zabrudzeniem.
- Zabrudzenia czyścić alkoholem.
- Łyżkę czyścić acetonem z zachowaniem ostrożności (z dala od ognia)

Przechowywać w temperaturze do 25° C.

Opakowanie: 10 ml

Producent

Zhermack[®]
TECHNICAL 

Zhermapol Sp. z o.o.

Ul. Augustówka 14 - 02-981 Warszawa - Polska

Tel. +48 22 858 82 72 - 858 73 41

Fax +48 22 642 07 14

biuro@zhermapol.pl