

Chema Polish I 35g



Zastosowanie

Pasta do oczyszczania koron i szyjek zębów, z użyciem szczoteczek maszynowych lub gładzików (kielichów gumowych), w celu usunięcia przebarwień, płytki nazębnej i złogów nazębnych, jako alternatywna tzw. piaskowania zębów.

Opis działania

Odpowiednio dobrany skład wyrobu zapewnia dobre właściwości ściernie, a obecność hydroksyapatytu zapobiega równocześnie nadwrażliwości szyjek zębów.

Sposób postępowania z wyrobem

Podczas stosowania wyrobu postępować według ogólnie przyjętych zasad profesjonalnego oczyszczania i polerowania zębów.

Po oczyszczeniu zaleca się polerowanie zębów pastą CHEMA POLISH II.

Nie należy pobierać jednorazowo zbyt dużej porcji pasty, gdyż może to spowodować jej rozpryskiwanie

podczas stosowania; ewentualnie zastosować odpowiednie środki ochrony.

Dostępne opakowanie

Opakowanie: tuba laminatowa zawierająca 35g pasty barwy różowej.

Warunki przechowywania

Wyrób przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze od 15°C –25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.