

CONSEAL F

Światłoutwardzalny lak szczelinowy

Ulotka informacyjna

CONSEAL f firmy SDI jest jednoskładnikowym światłoutwardzalnymlakiem szczelinowym nie wymagającym mieszania. Biały kolor laku, cieszy się największą popularnością i jest najczęściej używany przez stomatologów. Unikalna lepkość materiału CONSEAL f pozwala na przenikanie do wytrawionego szkliwa i penetrację głęboko w bruzdy i szczeliny zęba.

Skład:

Conseal F (White) - biały
93% wag. - wielofunkcyjny ester metakrylanu.
7% wag. - nieorganiczny wypełniacz.
Super Etch LV - Wytrawiacz - Płyn/Zel
37% kwas fosforowy

Przeznaczenie:

CONSEAL f jest przeznaczony do lakowania i zabezpieczenia:

- zębów ze zdrowymi lecz podatnymi na próchnicę szczelinami i bruzdami
- zębów z niewielką próchnicą powierzchniową

Instrukcja używania:

Oczyścić powierzchnię zgryzową zębów zdrowych lecz podatnych na próchnicę używając pasty profilaktycznej bez związków fluoru i tłuszczu. Przeplukać wodą, zaizolować ząb, usunąć zmienioną próchniczo zębinę wiertłem na wolnych obrotach. Nie naruszać zdrowej części zęba.

1. Wytrawianie:

Osuszyć powierzchnię przeznaczoną do wytrawiania suchym i czystym, wolnym od zanieczyszczeń olejowych powietrzem. Wytrawiać powierzchnię zgryzową wytrawiaczem Super Etch /37% kwas fosforowy/ przez co najmniej 30 sekund, nie dłużej niż 60 sekund.

2. Wymyć wodą.

3. Całkowicie wysuszyć ząb czystym, wolnym od zanieczyszczeń olejowych powietrzem przez 15 sekund

UWAGA:

Wytrawione szkliwo powinno przybrać matowy, biały wygląd. W przeciwnym wypadku lub gdy powierzchnia została zanieczyszczona śliną lub krwią, proces wytrawiania należy powtórzyć.

4. Bezpośrednio wstrzyknąć /lub nałożyć pędzelkiem/ lak szczelinowy Conseal f.

5. Naświetlać Conseal f przez 20 sekund. Sprawdzić czy powierzchnia laku jest wolna od pęcherzyków, a bruzdy i szczeliny dokładnie wypełnione. Późniejsze uzupełnienia laku mogą być robione pod warunkiem, że zęby zostaną dokładnie odizolowane i wysuszone.

UWAGA:

Upewnić się, że aplikator jest mocno osadzony na strzykawce, poprzez przekręcenie go w strzykawce. Wolno wyciskać materiał Conseal f.

Jeżeli strzykawka z Conseal f jest używana po raz pierwszy lub po dłuższym przechowywaniu, należy wcisnąć małą ilość materiału Conseal f na szpatułkę, aby zapoznać się z jego konsystencją i ilością w wydobywanych porcjach.

Używać w temperaturze pokojowej 23°C.

Wstrząsnąć buteleczkę Conseal f przed użyciem.

Przechowywanie:

1. Przechowywać w temp. 10-25°C.
2. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.
3. Nie przechowywać w lodówce.

Środki ostrożności:

Unikać dłuższego kontaktu niespolimeryzowanego laku Conseal f ze skórą i błoną śluzową jamy ustnej, gdyż może to spowodować stan zapalny śluzówki lub podrażnienie skóry.

Osoby mające uczulenie na żywicę powinny natychmiast zaprzestać stosowania laku Conseal f.

Nie połykać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować laku Conseal f po upływie daty ważności.

Wytrawiacz Super Etch i Super Etch LV zawiera roztwór 37% kwasu fosforowego. Unikać kontaktu wytrawiacza Super Etch i Super Etch LV ze skórą, błoną śluzową jamy ustnej i oczami.

W razie przypadkowego kontaktu natychmiast spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać obficie wodą przez 15 minut i udać się po poradę do lekarza.

CONEAL f odpowiada międzynarodowemu standardowi jakości ISO 6874:1988.

Opakowania:

- 1. Zestaw:** 2 x 5 ml Conseal f
2 x 2 ml wytrawiacz Super Etch
- 2. 1 x 5 ml /buteleczka/ Conseal f**
- 3. Zestaw:** 10 x 1 g strzykawki Conseal f

- 4. Zestaw:** 3 x 1 g strzykawki Conseal f
1 x 1 ml wytrawiacz Super Etch LV
- 5. Pojedyncze** 1 g strzykawki Conseal f
- 6. Zestaw:** 20 x 0,09 g cavifil Conseal f

PRODUCENT: SOUTHERN DENTAL INDUSTRIES LTD
5-9 Brunson Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia, www.sdi.com.au

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Gama Sp. z o.o.

41-704 Ruda Śląska, ul. Hłonda 42

tel./fax (32) 248 29 02, e-mail: gama@post.pl, www.gamaip.pl

Data opracowania ulotki: lipiec 2003

SDI

CE
0510