



MEDISEPT



Velodes® Soft

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze.

Cechy produktu:

- Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sek.
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 90 sek.
- Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy.
- Łagodne dla skóry pH.
- Przebadany dermatologicznie.

Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
- Nawilża i pielęgnuje dłonie dzięki zawartości gliceryny.
- Wygodny w użyciu.
- Szybkie działanie.



Płyn



Higieniczna
dezynfekcja
w 30 sek.



Chirurgiczna
dezynfekcja
w 90 sek.



Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Velodes® Soft

Zastosowanie:

Velodes® Soft to preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o właściwościach bakteriobójczych, drożdżakobójczych oraz ograniczonych wirusobójczych. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów osłonkowych i nieosłonkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, Rota wirus.

| SPEKTRUM | NORMY WG EN 14885 | CZAS |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek.*, 60 sek. |
| Grzyby (<i>C.albicans</i>) | EN 1275 | 30 sek.* |
| Grzyby (<i>C.albicans</i>) | EN 13624 | 30 sek.* |
| Prątki gruźlicy (<i>M.terrae</i>) | EN 14348 | 30 sek.* |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek.* |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek.* |
| Wirus Rota | EN 14476 | 45 sek.* |
| Higieniczna dezynfekcja rąk | EN 1500 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek. |
| Chirurgiczna dezynfekcja rąk | EN 12791 | 2 x 1,5 ml w czasie 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godzin |

*warunki czyste

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Skład: substancja czynna w 100 g roztworu:

60 g propan-2-ol, 0,5 g glukonian chlorheksydyny

Opakowanie handlowe:

butelka 250 ml z atomizerem,
butelka 500 ml,
butelka 500 ml z pompką,
butelka 1 L,
wkład 1 L do dozownika manualnego,
wkład 1 L do dozownika automatycznego,
kanister 5 L



Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6174/15

Karta charakterystyki oraz arkusz danych składników dostępne na stronie www.medissept.pl

