

APS MARCIN WALASEK	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Strona: 1 z 1
	APS.09_INSTRUKCJA UŻYWANIA	Wydanie: 1
	Jednorazowe podkłady ochronne w rolce	Obowiązuje od: 23.05.2022

INSTRUKCJA UŻYWANIA

OPIS WYROBU MEDYCZNEGO

Jednorazowe podkłady ochronne w rolce. Wyrób stosowany jest u ludzi w celach medycznych, wspomaga procesy diagnozowania i leczenia podczas zabiegów medycznych, poprzez wchłanianie płynów ustrojowych, płynów leczniczych, resztek produktów leczniczych lub innych substancji.

ZASTOSOWANIE






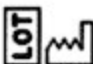
Jednorazowe podkłady ochronne w rolce znajdują zastosowanie w gabinetach lekarskich, klinikach medycznych w tym podczas procedur medycznych i zabiegów lekarskich.

DZIAŁANIE

Jednorazowe podkłady ochronne w rolce przeznaczone są do wchłaniania płynów ustrojowych, płynów leczniczych, resztek produktów leczniczych lub innych substancji z jamy ustnej podczas zabiegów, wspierają procesy diagnozowania i leczenia podczas zabiegów medycznych, poprzez wchłanianie płynów ustrojowych, płynów leczniczych, resztek produktów leczniczych lub innych substancji. Zapobiega również przenoszeniu bakterii przez zanieczyszczone ciało lub ubranie pacjenta, przez co zmniejszają ryzyko zakażeń. Podczas procedur medycznych z użyciem substancji drażniących, jednorazowe podkłady chronią odkryte części ciała pacjenta przed podrażnieniem lub alergią.

Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą wyrobu, gdyż znajdują się na niej ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wyrobu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA

	Wyrób jednorazowego użytku
	Wyrób niejałowy (niesterylny)
	CE – potwierdzenie spełnienia norm UE
	OKRES TRWAŁOŚCI: 3 LATA OD DATY PRODUKCJI
	Medical Device - oznakowanie że dany wyrób jest wyrobem medycznym
	Numerem serii produkcyjnej jest data produkcji

APS MARCIN WALASEK	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Strona: 2 z 1
	APS.09_INSTRUKCJA UŻYWANIA	Wydanie: 1
	Jednorazowe podkłady ochronne w rolce	Obowiązuje od: 23.05.2022

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Jednorazowe podkłady ochronne należy wyciągnąć z opakowania foliowego, a następnie oderwać przy perforacji jeden podkład.
2. Następnie rozłożyć ją na pacjencie.
3. Po stwierdzeniu znacznego zabrudzenia podkładu lub po zakończeniu procedury medycznej, należy podkład usunąć z pacjenta.
4. Zużyty podkład należy utylizować tak jak pozostałe odpady medyczne.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Wyrób należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

WYTWÓRCA

APS Marcin Walasek
ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry

Wyd.1.

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ:	Weronika Szeja	23.05.2022	
ZATWIERDZIŁ:	Marcin Walasek	23.05.2022	