

# MEDOLAB WIPES PLUS

**NOWOŚĆ!**  
opakowanie  
flow-pack

## Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do dezynfekcji

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia. Przeznaczone do utrzymania higieny wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, laboratoriach, gabinetach lekarskich, salonach kosmetycznych, fryzjerskich, jak również wszędzie tam, gdzie istotne jest szybkie działanie preparatu.

### NIEZAWODNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE OD ZAUFANEGO PARTNERA

- **Wygodne opakowanie flow-pack:  
duża i mięsista, dobrze nasączona chusteczka**
- **Szeroka skuteczność biobójcza**
- **Wyjątkowo krótki czas działania – już w 30 s**
- **Wygodne i bezpieczne dozowanie chusteczek**
- **Oszczędność czasu – gotowe do użycia**



# MEDIWIPES PLUS

**NOWOŚĆ!**  
opakowanie  
flow-pack

## Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do dezynfekcji

### CHARAKTERYSTYKA CHUSTECZEK

**MEDIWIPES PLUS** to jednorazowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji wszelkich małych powierzchni i wyposażenia odpornego na działanie alkoholu. Idealne do utrzymania higieny powierzchni i różnego rodzaju sprzętu, np.: w placówkach opieki medycznej, gabinetach stomatologicznych, salonach kosmetycznych i fryzjerskich.

Dostępność ich w dwóch rozmiarach (13 cm x 19 cm; 18 cm x 20 cm) i różnych opakowaniach sprawia, że są praktyczne, wygodne i łatwe w użytkowaniu.

### SKŁAD

Substancje dezynfekujące – etanol (70g)

### SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Skuteczność biobójcza		Czas ekspozycji
bakteriobójcza, grzybobójcza, prątkobójcza		1 min
Wirusobójcze	HIV/HBV/ HCV*	30 s
	Adenowirus, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus	30 s
	Poliowirus	5 min
	Papowavirus	15 min

\*wg RKI 01.2004 r.

### INSTRUKCJA UŻYCIA

Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę. Przetrzeć chusteczką całą powierzchnię dezynfekowanego wyposażenia. Odczekać zalecany czas ekspozycji - min. 30 sekund. Nie spłukiwać. Pozostawić do wyschnięcia. Pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.



### DLACZEGO MEDIWIPES PLUS?

- ▶ Wykazują **szerokie spektrum biobójcze** potwierdzone badaniami.
- ▶ Wyjątkowo **krótki czas ekspozycji** umożliwia przeprowadzanie procedur higienicznych na powierzchniach, które wymagają szybkiej dezynfekcji przed kolejnym użyciem.
- ▶ Dostępne w różnych opakowaniach, **w tym w komfortowym opakowaniu typu flow-pack** – foliowe opakowanie wyposażone w klips chroniący włókninę przed wysychaniem, zawierającym chusteczki w dużym rozmiarze i wysokiej gramaturze.
- ▶ Idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie środek dezynfekcyjny nie może być rozpryskiwany i istotne jest szybkie działanie.
- ▶ Znajdują **szerokie zastosowanie** do dezynfekcji wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie.
- ▶ Niezbędne w każdej torbie pierwszej pomocy np. karetki.
- ▶ **Gotowe do użycia** – mogą być użyte natychmiast, bez żadnych dodatkowych czynności.
- ▶ Bardzo wygodne i wydajne stosowanie – optymalny rozmiar, odpowiednie nasączenie oraz wysokiej wytrzymałości włóknina.
- ▶ Po zastosowaniu chusteczek dezynfekowana powierzchnia szybko schnie oraz pozostaje wolna od smug i plam.
- ▶ **Oszczędność** – możliwość nabycia opakowań uzupełniających do tuby wielokrotnego użytku.

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Tuba – 100 szt. chusteczek  
Wkład uzupełniający – 100 szt. chusteczek  
Opakowanie flow-pack – 48 szt. chusteczek



Wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością certyfikowanym wg norm ISO 9001 i ISO 13485.

Karta Charakterystyki i szczegółowe informacje nt. produktu dostępne na: [www.medilab.pl](http://www.medilab.pl)

**Wyłącznie do użytku profesjonalnego.**  
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką i etykietą produktu.

### PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

Medilab Sp. z o. o.  
ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok  
tel. (85) 747 93 53, fax: (85) 747 93 28  
e-mail: [handlowy@medilab.pl](mailto:handlowy@medilab.pl), [www.medilab.pl](http://www.medilab.pl)

Od ponad 25 lat oferujemy kompleksowe zaopatrzenie placówek służby zdrowia i innych obszarów gospodarki w produkty i środki do utrzymania higieny. W przypadku pytań zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie [www.medilab.pl](http://www.medilab.pl). Serdecznie zapraszamy do współpracy.

**MEDI**LAB