

Racestyptine

Roztwór do retrakcji dziąsła



Skład

Chlorek glinu sześciowodny 25 % m/V, oksychinol, podłoże wodno-alkoholowe.

Właściwości

Chlorek glinu charakteryzuje się działaniem ściągającym, które powoduje tamowanie miejscowego krwawienia i kurczenie się zewnętrznych warstw dziąsła poprzez wytrącanie protein tkankowych i surowicznych.

Wskazania

- wysięk i krwawienie z dziąsła.
- retrakcja dziąsła poprzez impregnację nici.

Sposób użycia

- Wysięk i krwawienie z dziąsła

Jedną lub dwie krople roztworu zaaplikować na dziąsło używając pipety lub bawełnianego wacika. Poczekać jedną do dwóch minut, a następnie dokładnie spłukać miejsce aplikacji.

- Retrakcja dziąsła

Najpierw wprowadzić nić retrakcyjną (nie medyczną) do kieszonki dziąsłowej, a następnie impregnować ją kilkoma kroplami roztworu. Pozostawić nić w tym miejscu trzy do pięciu minut, potem usunąć ją, upewniając się, iż żaden kawałek nici nie pozostał w kieszonce dziąsłowej. Dokładnie przepłukać.

Przeciwwskazania

Możliwość alergii na glin.
Nadwrażliwość lub uczulenie na związki chinoliny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania

- Aplikować tylko taką ilość kropeł, która jest niezbędna do uzyskania oczekiwanego rezultatu.
- Ograniczyć do minimum czas kontaktu roztworu z powierzchnią błony śluzowej.
- Natychmiast po ustąpieniu miejscowego krwawienia lub po pobraniu wycisku, dokładnie przepłukać aplikowaną powierzchnię, tak aby nie pozostawić drażniącej soli glinu.
- Nie stosować do dodatkowej impregnacji nici medycznych.
- Nie połykać.

RACESTYPTINE roztwór działa drażniąco na oczy i skórę.
RACESTYPTINE jest roztworem łatwopalnym.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Opakowanie

Buteleczki 13 i 45 ml.

Wyłącznie do profesjonalnego stosowania w praktyce dentystycznej.