

# **zeta 7 spray**

**IMPRESSIONS**



**SPRAY DISINFECTANT  
FOR IMPRESSIONS**

**READY TO USE**



U118205/A

**Zhermack<sup>®</sup>**  
**CLINICAL**



**PG CE 0123**

**Zhermack SpA**  
Via Bovazecchino, 100  
45021 Badia Polesine (Rovigo) - Italy  
tel. +39 0425 597611 - fax +39 0425 53596  
[www.zhermack.com](http://www.zhermack.com) - [info@zhermack.com](mailto:info@zhermack.com)

Last Update: 12/2009

# zeta 7 spray

PL

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do wycisków dentystycznych. Zeta 7 Spray to środek dezynfekujący nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia i o szerokim działaniu, opracowany i przetestowany zgodnie z nowymi ujednoliconymi normami europejskimi dotyczącymi dezynfekcji. Zeta 7 Spray przeznaczony jest do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji wycisków silikonowych (addycyjnych i kondensacyjnych), alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych: wyciski nie ulegają zmianie zachowując swą stabilność wymiarową i zgodność z wyciskami gipsowymi. Środek Zeta 7 Spray sprawia, że gips łatwiej przemieszcza się po powierzchni wycisku dentystycznego, a odtwarzane detale są bardziej precyzyjne. Ogranicza również ewentualne powstawanie pęcherzy.

**SKŁAD:** 100 g Zeta 7 Spray zawiera: 83 g etanolu, 10 g 2-propanolu, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, dodatki, substancje pomocnicze i wodę do 100 g.

**SPEKTRUM DZIAŁANIA:** Bakteriobójczy, grzybobójczy (test na *Candida albicans*), prątkobójczy, wirusobójczy. Aktywność zawieszinowa badana zgodnie z normami EN13727, EN13624, EN14348. Aktywność nośnikowa badana zgodnie z normą EN14563. Badanie działania wirusobójczego zgodnie z normą EN14476.

**UŻYCIE:** Natychmiast po wykonaniu wycisk płukać pod bieżącą wodą przez 30 sekund. Rozpylić Zeta 7 Spray aż do całkowitego pokrycia powierzchni wycisku. Pozostawić do wyparowania.

Działanie wirusobójcze:	3 minut	zabrudzenia (EN 14476)
Aktywność zawieszinowa:	1 minuta	bakteriobójczy (EN13727)
	1 minuta	grzybobójczy (EN13624, test na <i>Candida albicans</i> )
	2 minuty	prątkobójczy (EN14348)
Aktywność nośnikowa:	2 minuty	prątkobójczy (EN14563)

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:** Produkt przeznaczony jest do stosowania przez wykwalifikowane osoby znające odpowiednie normy bezpieczeństwa. Używać rękawic ochronnych. Pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać kontaktu Zeta 7 Spray z materiałami wrażliwymi na działanie alkoholu. Unikać kontaktu Zeta 7 Spray z innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami. Ewentualne niewielkie różnice zapachowe spowodowane są obecnością naturalnych aromatów i nie wpływają negatywnie na jakość produktu.

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:** R11: Produkt wysoce łatwopalny. R36: Działa drażniąco na oczy. - R52/53: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Kartę Charakterystyki Substancji można pobrać w formacie PDF z naszej strony internetowej: [www.zhermack.com](http://www.zhermack.com)